

## Intact PTH Bioactiva

دستورالعمل استفاده:

۱- محتویات کیت به دمای اتاق رسانده شود.

۲- محلول Wash به نسبت ۱/۲۰ با آب مقطر تازه تهیه شود. ( آب مقطر 25ml wash+475ml )

۳- مقدار 25 ul کالیبراتور - کنترل و نمونه بیمار به چاهک ها افزوده، 50ul کنژوگه Biotin و 50ul کنژوگه HRP اضافه شود و سپس ۹۰ دقیقه در دمای اتاق و روی شیکر (500-600rpm) انکوبه شود.

۴- چاهک ها ۴ بار شستشو شوند. ( با رعایت ۳۰ ثانیه soaking time )

۵- مقدار 100ul TMB افزوده و ۱۵ دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه شود.

۶- 50 ul محلول متوقف کننده افزوده و در کمتر از ۱۵ دقیقه خوانش نوری در 450-630nm انجام شود.

محدوده مرجع:

**Intact PTH 9.0-94 pg/ml**